



Kühl-Wärmekissen „Bead“ 09197

Achtung:

Nicht zum Verzehr geeignet!

Nicht im Backofen und in der Mikrowelle erwärmen!

Nicht gewaltsam öffnen.

Das Kühl-Wärmekissen darf Babys und Kleinkindern nur unter Aufsicht gegeben werden.

Das Kühl-Wärmekissen ist kein Spielzeug!

Entsorgen Sie das Kühl-Wärmekissen sofort in Ihrem Hausmüll, wenn Sie Beschädigungen feststellen. Freiwerdendes Gel abwaschen.

Spitze Gegenstände von dem Kühl-Wärmekissen fernhalten.

Das Kissen kann als Kühl-Wärmekissen beliebig oft verwendet werden.

Kühlkissen:

Legen sie das Kissen in den Kühlschrank und bewahren Sie es dort auf, bis Sie es benötigen. Sie können das Kissen auch in das Gefrierfach legen, aber maximal für 15 Minuten! Das Kühlkissen kann zu kalt werden, so dass es auf der Haut Erfrierungen verursacht.

Wärmekissen:

Das Kissen 10-15 Minuten in ca. 60° C heißes Wasser legen. Das Wärmekissen nimmt die Temperatur des Wasser an und Sie entscheiden, welche Temperatur für sie angenehm ist.

Achtung! Nicht in der Mikrowelle erwärmen! Nicht im Backofen erwärmen! Das Wärmekissen kann platzen oder zu heiß werden und Verbrennen verursachen.

Reinigung und Aufbewahrung:

Verschmutzungen des Kissens können mit Wasser und Reinigungsmittel entfernt werden. Nach der Reinigung trocknen und an einem trockenen Ort aufbewahren

elasto form KG, Franz-Sollfrank-Straße 6, 92237 Sulzbach-Rosenberg www.elasto-form.de